


## Veiledning til utlasting av data

### ZOLL AED Plus hjertestarter med infrarød port

#### Nødvendig utstyr

PC med følgende program installert:

- RescueNet Code Review (fra CD eller [www.zolldata.com/rescuenet-code-review](http://www.zolldata.com/rescuenet-code-review))
- Microsoft .Net Framework (fra Microsoft Update eller [www.zolldata.com/c-r-downloads](http://www.zolldata.com/c-r-downloads))
- Infrarød port på/fra pc

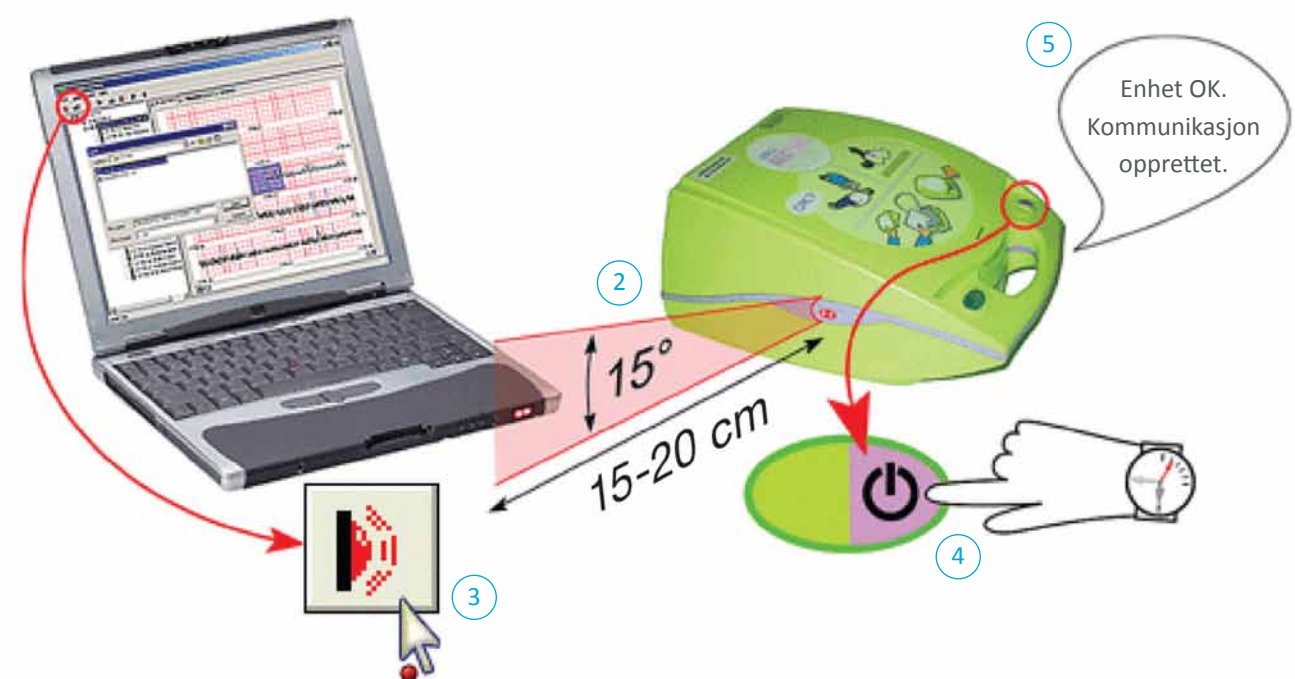

#### Veiledning

- 1) Åpne programmet **RescueNet Code Review** på pc. Programmet åpner en tom side.
- 2) Plasser hjertestarteren, slik at den **infrarøde porten** peker mot den infrarøde leseren på pc.
- 3) Velg: **Upload Case from Infrared** i programmet RescueNet Code.
- 4) Hold **AV/PÅ knappen** på hjertestarteren inne i 7-8 sekunder.
- 5) Vent til hjertestarteren sier: **Enhet OK. Kommunikasjon opprettet** (kan ta opptil 20 sekunder).
- 6) Overføringsprosessen vises nå i en dialogboks i programmet **RescueNet Code Review**.
- 7) For å **skrive ut data**, trykk følgende: File - Print - Case - Stripes - OK.