

Veiledning til utlasting av data

ZOLL AED Pro hjertestarter med USB port

Nødvendigt udstyr

PC med følgende programmer installeret:

- RescueNet EventSummary (www.zoll.com/products/data/public-safety/rescuenet-eventsummary)
- USB port på pc



Vejledning

- 1) Åpne programmet **RescueNet EventSummary** på pc. Programmet åpner en tom side.
- 2) **Åpne batteridekselet** på AED Pro hjertestarteren ved å åpne låsen foran og løfte opp dekslet.
- 3) Hold **Av/På knappen** på hjertestarteren inne i 7-8 sekunder.
- 4) Trykk på den venstre Softkey merket **USB**.
- 5) Trykk på den venstre Softkey merket **NY**.
- 6) **Sett USB minnebrikke i USB porten** til høyre for batteriet. (Det kan være nødvendig å fjerne gummidekselet først).
- 7) Hjertestarteren gjenkjenner minnebrikken og laster ut data. Når dataoverføringen er ferdig gir hjertestarteren beskjed om dette: **Fjern USB stikk fra hjertestarteren og sett den inn i pc.**
- 8) Trykk på knappen **Upload Case From USB**. Velg den stasjon som representerer din minnebrikke og **klikk OK**.
- 9) Overføringsprosessen vises nå i en dialogboks i programmet **RescueNet EventSummary**.
- 10) For å **skrive ut data**, trykk følgende: File - Print - Case - Stripes - OK.