

Slik skifter du elektrode på din ZOLL AED Plus hjertestarter




1 Plasser hjertestarteren på et flatt underlag.



2 Ta av lokket på hjertestarteren.



3 Ta tak i den hvite kontakten som står i starteren og trekk den ut.

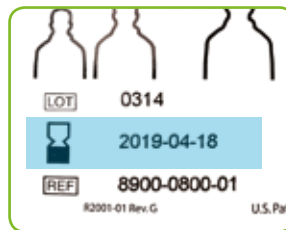

4 Ta ut elektroden av pappkassen og kontrollerer datostemplingen.



5 Sett i den nye elektroden i kontakten. Trykk hardt ned.



6 Brett inn hjørnene på elektrodepakken, slik at den passer under lokket.



7 Trekk den gule datolappen ut gjennom åpningen på lokket.



8 Monter lokket på hjertestarteren.

Elektrode er nå skiftet og hjertestarteren er klar til å skifte batterier.

Snu for veiledning.

Slik skifter du batterier på din ZOLL AED Plus hjertestarter



- 1 Snu hjertestarteren slik at baksiden vender opp.




- 2 Bruk en nøkkel eller mynt til å trykke inn de 2 klemmene på batteridekselet.

Bruk samtidig en hånd for å klikke lokket av starteren.




- 3 Ta av dekselet og ta ut de gamle batteriene.

Sett i nye batterier og sørg for at de blir plassert korrekt.



Alle 10 batterier SKAL skiftes samtidig. Bruk kun Duracell eller Power One batterier. Panasonic, Varta eller Rayovac batterier anbefales IKKE i bruk.

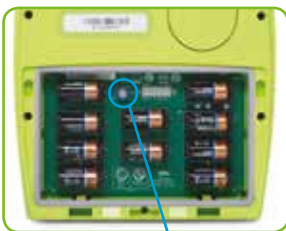

- 4 Når batteriene er montert vil hjertestarteren etter kort tid be deg om å trykke på batteri-nullstillings-knappen.

Trykk på null-stillings-knappen innen 15 sek etter at du hører denne beskjeden:

"hvis batterier er nye, trykk på knappen"

Hvis elektrode ikke er montert i kontakten vil starteren gi deg følgende beskjed: **"sett i kontakten"**



- 5 Batteridekselet klikkes/monteres på plass.



- 6 Kontroller at der lyser et grønt tegn ✓ i indikatorvinduet.

Hjertestarteren er nå klar til bruk. Batterier og elektrode har 5 års holdbarhet i standbytid.
www.medidyne.no